



**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA**

*Servizio Prevenzione e Protezione*  
Via Brenta 1 – 96100 Siracusa Tel. 0931484550 – Fax: 0931484541  
E-mail: spp@asp.sr.it - PEC: prevenzionee protezione.sr@pec.asp.sr.it

**Ai Dirigenti con delega di funzione di Datore di Lavoro**

**Ai Direttori di PO**

**Al Direttore di Dipartimento di Prevenzione Medica**

**Ai Direttori di Distretto**

**Alla Dirigente del UOSD PTE-118**

**AI RSPP SEUS**

**Al Medico Competente Coordinatore**

**Agli RLS**

*e.p.c. Al Direttore Generale*  
*Al Direttore Sanitario*  
*Al Direttore Amministrativo*

VIA PEC

**Siracusa, 28/10/2020**

**OGGETTO: Attuazione Procedure di Vestizione / Svestizione Covid 19**  
**Trasmissione**

\*\*\*\*\*

Su disposizione del Direttore Generale, lo scrivente Servizio di Prevenzione e Protezione ha elaborato le procedure di vestizione (*Allegato 1*) e svestizione (*Allegato 2*), **da attuare in caso di utilizzo di tuta EN 14126:2004 negli interventi a rischio infettivo.**

Si evidenzia che le procedure in parola:

- sono state formulate tenendo in considerazione le indicazioni fornite durante il corso “*HEALTH BIOSAFETY TRAINING - Procedura di Vestizione e Svestizione con DPI per Biocontenimento*” organizzato con il supporto scientifico del dott. Ulrico ANGELONI, Dirigente medico del Ministero della salute e Focal Point del progetto *Health Biosafety Training* della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute;
- sono state preventivamente visionate e approvate dal Direttore della U.O.C. Malattie Infettive del PO di Siracusa.

Si prega di darne massima diffusione.

*Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*  
*Ing. Sebastiano MIDOLO*

(Allegato 1: Procedure di Vestizione\_V01)

## Procedura di VESTIZIONE con tuta UNI EN 14126:2004 (prima di ogni intervento a rischio infettivo)

### Il KIT DPI di Biocontenimento sarà composto da:

- Tuta UNI EN 14126:2004 classe 3 tipo 4/5/6;
- Calzari UNI EN 14126:2004 classe 3 tipo 4/5/6;
- Guanti in nitrile UNI EN 374-3:2004 lunghezza standard;
- Guanti monouso in nitrile UNI EN 374-3:2004 lunghezza 300 mm (se possibile, di colore diverso al fine di individuare più facilmente eventuali lacerazioni del primo paio di guanti);

*NOTA: qualora non fossero a disposizione le due tipologie di lunghezza dei guanti, vanno bene anche 2 paia di guanti lunghi o comunque di lunghezza tale da potersi sovrapporre alla manica della tuta senza distaccarsi durante i movimenti.*

- Mascherina (semimaschera filtrante) FFP2 UNI EN 149:2009 (oppure nei casi previsti FFP3 UNI EN 149:2009; oppure maschere intere UNI EN 136:2000; oppure Semi maschera e quarti di maschera UNI EN 140:2000);
- Occhiali di protezione UNI EN 166:2004 eventualmente in combinazione con Visiera UNI EN 166:2004 (oppure: Occhiali a maschera UNI EN 166:2004).

*NB: i DPI di III Cat necessitano di addestramento a norma di legge*

### Operazioni preliminari

Prima della vestizione, l'operatore:

- Avrà cura di rimuovere oggetti che potrebbero danneggiare la tuta (es. monili, indumenti con cerniere etc);
- Provvederà a praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica;
- Controllerà l'integrità dei dispositivi di protezione da indossare;

*NOTA: ricordarsi di espellere eventuali deiezioni e assumere acqua ed eventuali integratori salini.*

### Vestizione

1. Solo se necessita, indossare l'apparato di comunicazione (possibilmente nella parte inferiore della schiena);
2. Indossare la tuta (senza indossare il cappuccio);
3. Indossare le scarpe;
4. Indossare i copri calzari inserendoli all'interno della tuta;
5. Indossare la mascherina verificandone la tenuta (ispirando ed espirando, la mascherina deve aderire al viso; attenzione alla barba che potrebbe impedire la perfetta aderenza);
6. Indossare gli occhiali di protezione;

7. Indossare il cappuccio della tuta e chiudere la cerniera;

*NOTA: nel caso in cui gli occhiali protettivi non coprissero totalmente eventuali occhiali da vista, indossare la visiera sopra il cappuccio della tuta; analogamente, qualora si disponesse anche di visiera, questa va posta sempre al di sopra del cappuccio della tuta.*

8. Indossare il primo paio di guanti (*quelli di lunghezza standard*);

9. Indossare il secondo paio di guanti (*quelli lunghi*);

10. Verificare il comfort della tuta (*piegandosi avanti, indietro; alla fine del test la tuta non deve presentare lacerazioni*);

11. Apporre il nome dell'operatore e l'orario di ingresso in zona contaminata sulla spalla lato sx;

*NOTA: nel caso di utilizzo della maschera pieno facciale, dopo il punto 4:*

- *Detergere le mani;*

- *Indossare la maschera pieno facciale avendo cura di verificarne la perfetta aderenza al viso;*

*riprendere dal punto 7.*



(Allegato 2: Procedure di Svestizione\_V01)

## **Procedura di SVESTIZIONE con tuta UNI EN 14126:2004** (prima di ogni intervento a rischio infettivo)

### **Ausili per l'attuazione della procedura**

- Soluzione decontaminante per la nebulizzazione;
- Soluzione decontaminante per le mani;
- Tappetino da disporre a terra (*anche una traversa va bene*);
- Contenitore rifiuti speciali;
- Sedia;
- Banchetto (*o simile per appoggiare la soluzione decontaminante per le mani*);

### **Caratteristiche dell'area di svestizione**

Nei luoghi dove avverrà la svestizione, identificare (*eventualmente fare delimitazione con nastro*):

- una “zona sporca”, in cui si posizionerà l'operatore che dovrà svestirsi;
- una “zona pulita”, in cui si posizionerà l'operatore che aiuterà nella vestizione e NESSUN ALTRO.

L'area, da percorrere a senso unico, dovrà essere dotata di due aperture, una per l'ingresso (*sporco*) e una per l'uscita (*pulito*).

### **Operazioni preliminari alla svestizione**

Prima della svestizione, l'operatore in assistenza:

- verificherà che l'ambiente in cui avverrà la svestizione è stato sanificato;
- decontaminerà il sacco e lo disporrà nella “zona sporca”;
- preparerà davanti a sé il TAPPETINO e lo nebulizzerà con la soluzione decontaminante.

*N.B.: I tempi di azione dei principi attivi sono riportati nelle etichette dal produttore*

### **Procedura di Decontaminazione e Svestizione**

1. Spruzzare con cura la TUTA con apposito nebulizzatore;
2. Nebulizzare la SEDIA che utilizzerà l'operatore in svestizione;

*NOTA: in caso venga utilizzata, rimuovere la visiera*

3. Seduti, iniziare la rimozione delle LEGATURE alla caviglia della tuta;
4. Aprire la PATELLA copri cerniera della tuta e nebulizzare la cerniera;

*Detergere i guanti con la soluzione decontaminante;*

5. Aprire la CERNIERA tirando verso il basso e verso l'esterno;

*Detergere i guanti con la soluzione decontaminante;*

6. Rimozione GUANTI Lunghi (*i più esterni*) come segue:

1. *Afferrare l'esterno di un guanto dal polso;*
2. *Sfilare successivamente il guanto dalla parte interna verso l'esterno e tenere il guanto appena tolto nell'altra mano;*
3. *Rimuovere successivamente il secondo guanto mettendo le dita dentro il guanto nella parte superiore del polso;*
4. *Capovolgere il secondo guanto, lasciando il primo all'interno di quest'ultimo;*
5. *Gettare i guanti nel sacco rifiuti;*

*Detergere il secondo paio di guanti con la soluzione decontaminante;*

7. Rimozione TUTA:

1. *Levare il cappuccio della tuta, ripiegandolo verso l'esterno;*
2. *Sfilare la parte superiore della tuta, arrotolandola sempre verso l'esterno;*
3. *Sfilare la parte inferiore della tuta arrotolandola sempre verso l'esterno;*
4. *Sfilare la tuta dalle caviglie e gettarla nel sacco;*

*Detergere i guanti con la soluzione decontaminante*

8. Rimuovere i CALZARI e gettarli nel sacco rifiuti, successivamente
9. Posizionarsi sul TAPPETINO "ZONA PULITA";

*Detergere i guanti con la soluzione decontaminante*

10. Rimuovere gli OCCHIALI PROTETTIVI, (*Provvedere alla decontaminazione con le modalità indicate dal fabbricante oppure gettarli nel sacco se del tipo NON Riutilizzabile*).

*Detergere i guanti con la soluzione decontaminante*

11. Rimuovere la MASCHERINA avendo cura di allontanarla dal viso (*durante la rimozione inclinarsi in avanti e tirare la mascherina verso l'alto*) e gettarla nel sacco;

*Detergere i guanti con la soluzione decontaminante*

12. Rimozione GUANTI (corti) come segue:

1. *Afferrare l'esterno di un guanto da polso*
2. *Sfilare il guanto (dalla parte interna verso l'esterno)*
3. *Tenere il guanto appena tolto nell'altra mano*
4. *Staccare l'altro guanto mettendo le dita nella parte superiore del polso*
5. *Capovolgere il secondo guanto (lasciando il primo all'interno del secondo)*

Gettare i guanti nel sacco;

LAVARSI LE MANI con specifico prodotto igienizzante. L'operatore può uscire attraversando la zona pulita.

**Operazioni finali**

A operazioni di sanificazione concluse, l'operatore in assistenza provvederà a richiedere la sanificazione dell'intero ambiente.

*Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*  
Ing. Sebastiano MIDOLO

